

HaemoCer™ PLUS

Einfache Anwendung, effektive Wirkung DAPI

Verhaltensregeln
zur Blutstillung

DRY

Austretendes überschüssiges Blut mit einer Kompresse entfernen, damit das Pulver direkt auf die Blutungsquelle aufgetragen werden kann.



NASS

Bei zu viel Blut im Wundbereich kann das Pulver nicht direkt die Blutungsquelle stoppen, sondern wirkt nur an der Oberfläche.

APPLY

Zügig & großflächig HaemoCer™ PLUS auf die Blutungsquelle auftragen. Wichtig ist, dass die gesamte Wundoberfläche mit Pulver bedeckt ist.



ANWENDEN

Kontakt des Applikators mit dem Blut vermeiden.

Keine Häufchen bilden.

Nicht langsam und stoßartig auftragen.

PRESS

Mit einer **TROCKENEN** Kompresse mäßigen Druck auf die Wunde ausüben - ohne jegliche Bewegung.



BEWEGEN

Kein Drehen oder Wenden der Kompresse.

Eine nasse Kompresse aktiviert die HaemoCer™ PLUS Partikel und reduziert die Blutstillung.

IRRIGATE

Zum Entfernen der Kompresse diese ausreichend befeuchten, um Verklebungen zu lösen, damit die Gelschicht nicht mit entfernt wird.



ABREIßEN

Ohne Befeuchten wird die Gelschicht abgerissen.

Erst nach der erfolgten Blutstillung entfernen.



made in
Germany

HaemoCer™ PLUS

Blutstillungspulver

HaemoCer™ PLUS besteht zu 100% aus gereinigter pflanzlicher Stärke ohne Zusatz von tierischen oder humanen Bestandteilen.

Aufgrund seiner hydrophilen Eigenschaften besitzt HaemoCer™ PLUS eine extrem hohe Wasseraufnahmefähigkeit, wodurch die natürliche Blutgerinnung (Hämostase), ohne chemische oder pharmazeutische Interaktion, beschleunigt wird.

Es kommt zu einer Anreicherung von Fibrin, Thrombin und roten Blutkörperchen an der Blutungsquelle. Es bildet sich ein körpereigener Clot und die Blutung wird gestillt.

Nach erfolgter Blutstillung wird die Wunde von einer stabilen und fest haftenden Gel-Schicht umgeben. Diese dient als zusätzliche Barriere zum Schutz vor erneutem Blutaustritt.

HaemoCer™ PLUS wird durch Amylase innerhalb von 48 Stunden vom Körper zu 100 % abgebaut.



100% resorbierbar



Nach max. 48h
resorbiert



Auf pflanzlicher
Basis



Einfache
Anwendung

BioCer

BioCer Entwicklungs-GmbH

Ludwig-Thoma-Str. 36c · 95447 Bayreuth · Germany · Tel. +49 (0)921 78 77 70 0

Fax. +49 (0)921 78 77 70 79 · info@biocer-gmbh.de · www.biocer-gmbh.de

