


HaemoCerTM

Universal Applicator

Gebrauchsanweisung

 **BioCer Entwicklungs-GmbH**
Ludwig-Thoma-Straße 36c
95447 Bayreuth, Germany
Tel.: +49 (0921) 787770-0
Fax: +49 (0921) 787770-79
info@biocer-gmbh.de
www.biocer-gmbh.de

Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of physician.

BioCer and HaemoCerTM are trademarks of BioCer Entwicklungs-GmbH in Bayreuth.



HRD121.01DE/2024-04

Inhalt

HaemoCerTM Universal Applicator

Beschreibung

HaemoCerTM Universal Applicator ist eine flexible, manuelle Vorrichtung für den Einmalgebrauch zur Abgabe des resorbierbaren Blutstillungspulvers HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS.

HaemoCerTM Universal Applicator hat eine nutzbare Länge von 38 cm. **Vollständige Informationen zu dem chirurgischen Blutstillungspulver sind der Gebrauchsanweisung von HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS zu entnehmen.**

Indikationen

HaemoCerTM Universal Applicator ist für die Einbringung des HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS Blutstillungspulvers in chirurgische Wundoberflächen bei verschiedenen medizinischen Indikationen vorgesehen.

Vorbereitung

- Überprüfen Sie vor der Benutzung des HaemoCerTM Universal Applicators, die Verpackung auf Unversehrtheit. Ist die Verpackung zuvor geöffnet oder beschädigt worden, ist diese zu entsorgen und durch ein neues Produkt zu ersetzen.
- Entnehmen Sie den Applikator aus dem sterilen Beutel und kontrollieren Sie diesen auf Unversehrtheit.
- Schließen Sie die Klemme am oberen Ende des Applikators und stecken Sie diesen fest auf den mit dem Blutstillungspulver HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS bereitgestellten Applikator wie auf dem Bild rechts dargestellt.

Anwendung

- Bereiten Sie den Applikationssitus wie in der Gebrauchsanleitung von HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS beschrieben vor.
- Positionieren Sie die Applikatorspitze möglichst nah an der Blutungsstelle.
- Öffnen Sie die Klemme und verabreichen Sie das Pulver über den Universal Applicator durch mehrfaches Pumpen des Faltenbalgfläschchens.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Applikatorspitze mit dem Blut, um ein Verblocken der Zuführung zu verhindern. Sollte es dennoch zu einem Verstopfen der Applikatorspitze kommen, kann diese mit einer scharfen Schere abgeschnitten werden.

Kontraindikationen

Injizieren Sie HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS nicht direkt in Blutgefäße, da hierdurch die Gefahr einer extensiven intravaskulären Koagulation besteht.

Verwenden Sie HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS nicht für die Kontrolle von post-partum Blutungen oder bei Menorrhagie.

Injizieren Sie HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS nicht in die Blase oder Harnröhre.

Injizieren Sie HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS nicht in die Augen.

HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS ist nicht geeignet für Patienten mit einer Unverträglichkeit gegenüber Stärke oder stärkehaltigen Produkten.

Warnungen

HaemoCerTM / HaemoCerTM PLUS in Kombination mit dem Universal Applicator soll geeignete operative Praktiken und insbesondere die sachgerechte Anwendung konventioneller Techniken zur Hämostase (z.B. Ligaturen) nicht ersetzen.

HaemoCerTM Universal Applicator wird steril geliefert und darf nicht resterilisiert werden. Nicht verwendete, bereits geöffnete Produkte müssen entsorgt werden.

Eine Wiederverwendung von Medizinprodukten, die zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen für den Patienten und zu einer Fehlfunktion des Produktes führen.

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt darf nur von Chirurgen verwendet werden, die mit den jeweiligen chirurgischen Praktiken vertraut sind. Der Chirurg trägt die Verantwortung für die Anwendung.

Nebenwirkungen

Bis dato keine bekannt.

Aufbewahrung

HaemoCerTM Universal Applicator ist bei Raumtemperatur in der Originalpackung unter Lichtschutz zu lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.



BioCer