


HaemoCer™

Universal Applicator

Käyttöohjeet

 BioCer Entwicklungs-GmbH
Ludwig-Thoma-Straße 36c
95447 Bayreuth, Germany
Tel.: +49 (0921) 787770-0
Fax: +49 (0921) 787770-79
info@biocer-gmbh.de
www.biocer-gmbh.de

Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of physician.

BioCer and HaemoCer™ are trademarks of BioCer Entwicklungs-GmbH in Bayreuth.



HRD121.01FI/2024-04

Sisältö

HaemoCer™ Universal Applicator

Kuvaus

HaemoCer™ Universal Applicator on joustava, kertakäyttöinen käsikäyttöinen laite HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -absorboituvan hemostaattisen jauheen annosteluun. HaemoCer™ Universal Applicatorin käyttökelpoinen pituus on 38 cm. Täydelliset tiedot kirurgisesta hemostaattijauheesta löytyvät HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -käyttöohjeesta.

Käyttöaiheet

HaemoCer™ Universal Applicator on tarkoitettu HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -hemostaattijauheen annosteluun kirurgisille haavapinnoille erilaisissa lääketieteellisissä käyttötarkoituksissa.

Valmistelu

- Tarkista pakkauksen eheys ennen HaemoCer™ Universal Applicatorin käyttöä. Jos pakkaus on aiemmin avattu tai vahingoittunut, hävitä se ja vaihda uuteen tuotteeseen.
- Poista applikaattori steriilistä pussista ja tarkista sen eheys.
- Sulje applikaattorin yläosassa oleva puristin ja kiinnitä se tukevasti HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -hemostaattijauheen mukana toimitettuun applikaattoriin oikealla olevassa kuvasa esitetyllä tavalla.

Käyttöohjeet

- Valmistele levityskohta HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
- Aseta applikaattorin kärki mahdollisimman lähelle verenvuotokohtaa.

Avaa puristin ja annostele jauhe universaalín applikaattorin avulla pumppaamalla pullopulloa useita kertoja.

- Vältä applikaattorin kärjen joutumista kosketuksiin veren kanssa, jotta vältetään annostelun tukkeutuminen. Jos applikaattorin kärki tukkeutuu, se voidaan katkaista terävillä saksilla.

Vasta-aiheet

Älä ruiskuta HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -valmistetta suoraan verisuoniin, koska on olemassa laajojen verisuonensisäisten vaurioiden riski. Laajan verisuonensisäisen hyytymisen riski.

Älä käytä HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -valmistetta synnytyksen jälkeisen verenvuodon tai menorragian hoitoon.

Älä ruiskuta HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -valmistetta virtsarakkoon tai virtsaputkeen.

Älä ruiskuta HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -valmistetta silmiin.

HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS ei sovellu potilaille, joilla on intoleranssi tärkkelykselle tai tärkkelystä sisältäville tuotteille.

Varoitukset HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS yhdistettynä Universal Applicator -laitteeseen ei ole tarkoitettu korvaamaan asianmukaisia kirurgisia käytäntöjä ja erityisesti perinteisten hemostaasitekniikoiden (esim. ligatuuri) asianmukaista käyttöä.

HaemoCer™ Universal Applicator toimitetaan steriilinä, eikä sitä saa steriloida uudelleen. Käytämättömät, jo avatut tuotteet on hävitettävä.

Kertakäyttöön tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia terveysongelmia ja tuotteen toimintahäiriöitä.

Varotoimenpiteet

Tätä tuotetta saavat käyttää vain kirurgit, jotka tuntevat siihen liittyvät kirurgiset käytännöt. Kirurgiset käytännöt. Kirurgi on vastuussa sen käytöstä.

Sivuvaikutukset

Tähän mennessä ei ole tiedossa.

Varastointi

HaemoCer™ Universal Applicator on säilytettävä huoneenlämmössä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna. Suojattu valolta. Suojaa kosteudelta.



BioCer