


# HaemoCer™ FlexApplicator

## Käyttöohjeet

 BioCer Entwicklungs-GmbH  
Ludwig-Thoma-Straße 36c  
95447 Bayreuth, Germany  
Tel.: +49 (0921) 787770-0  
Fax: +49 (0921) 787770-79  
info@biocer-gmbh.de  
www.biocer-gmbh.de

Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of physician.

BioCer and HaemoCer™ are trademarks of BioCer Entwicklungs-GmbH in Bayreuth.



HRD123.01FI/2024-04

### Sisältö

HaemoCer™ FlexApplicator

### Kuvaus

HaemoCer™ FlexApplicator on kertakäyttöinen, joustava, käsikäyttöinen laite HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -absorboituvan hemostaattijauheen annosteluun. HaemoCer™ FlexApplicatorin käyttökelpoinen pituus on 14 cm. Integroidun johdon ansiosta HaemoCer™ FlexApplicator voidaan taivuttaa ja se säilyttää muotonsa. **Täydelliset tiedot kirurgisesta hemostaattijauheesta löytyvät HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -käyttöohjeesta.**

### Käyttöaiheet


HaemoCer™ FlexApplicator on tarkoitettu HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -hemostaattijauheen asettamiseen kirurgisille haavapinnoille eri lääketieteellisissä käyttötarkoituksissa.

### Valmistelu

- Tarkista pakkauksen eheys ennen HaemoCer™ FlexApplicatorin käyttöä. Jos pakkaus on aiemmin avattu tai vahingoittunut, hävitä se ja vaihda se uuteen tuotteeseen.
- Poista applikaattori steriilistä pussista ja tarkista, että se on ehjä.
- Aseta HaemoCer™ FlexApplicator tiukasti HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -hemostaattijauheen mukana toimitettuun applikaattoriin kuvan mukaisesti.

### Käyttöohje

- Valmistele levityskohta HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
- Muotoile HaemoCer™ FlexApplicatoria tarpeen mukaan, jotta pääset käsiksi leikkauskohtaan.
- Aseta applikaattorin kärki mahdollisimman lähelle verenvuotokohtaa.
- Annostele jauhe HaemoCer™ FlexApplicatorin kautta pumppaamalla paljempulloa useita kertoja.
- Vältä applikaattorin kärjen joutumista kosketuksiin veren kanssa, jotta vältetään annostelun tukkeutuminen.

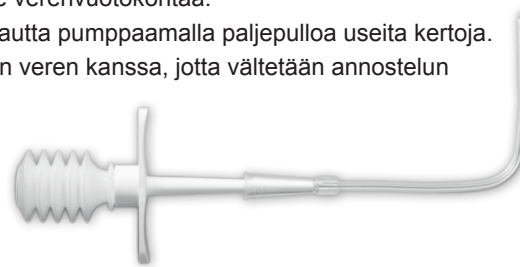

### Vasta-aiheet

Älä ruiskuta HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -valmistetta suoraan verisuoniin, sillä on olemassa riski, että laajan verisuonensisäisen hyytymisen riski.

Älä käytä HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -valmistetta synnytyksen jälkeisen verenvuodon tai menorragian hoitoon.

Älä ruiskuta HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -valmistetta virtsarakkoon tai virtsaputkeen.

Älä ruiskuta HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS -valmistetta silmiin.

HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS ei sovellu potilaille, joilla on intoleranssi tärkkelykselle tai tärkkelystä sisältäville tuotteille.

### Varoitukset

HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS yhdessä FlexApplicatorin kanssa ei ole tarkoitettu korvaamaan asianmukaisia leikkaukseenkäytäntöjä ja erityisesti perinteisten hemostaattisten tekniikoiden (esim. ligataatiota) asianmukaista käyttöä.

HaemoCer™ FlexApplicator toimitetaan steriilinä, eikä sitä saa steriloida uudelleen. Käyttämättömät, jo avatut tuotteet on hävitettävä.

Kertakäyttöiseksi tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia terveysongelmia ja tuotteen toimintahäiriöitä.

### Varotoimenpiteet

Tätä tuotetta saavat käyttää vain kirurgit, jotka tuntevat siihen liittyvät kirurgiset käytännöt. Kirurgi on vastuussa sen käytöstä. HaemoCer™ FlexApplicatoria ei saa leikata.

### Sivuvaikutukset

Tähän mennessä ei ole tiedossa.

### Varastointi

HaemoCer™ FlexApplicator on säilytettävä huoneenlämmössä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna. Suojaa kosteudelta.

# BioCer